

Diversey

IntelliCare™
Smarter Design.
Sustainable Care.
Hybrid-Spender für
die Händehygiene

Eine umfassende und intelligente Lösung für die Händehygiene

IntelliCare™ ist ein umfassendes und intelligentes System für die Händehygiene, das zur Verhinderung von Infektionen, zur Steigerung der Produktivität sowie zum Schutz Ihres Markenimages entwickelt wurde.

Der IntelliCare™ Hybrid-Spender ist der weltweit erste Spender für Händehygiene-Produkte, der über eine patentierte Hybrid-Technologie verfügt, dank derer Händehygiene ununterbrochen verfügbar ist. IntelliCare ist eine vielseitige, moderne und langlebige Plattform mit Flüssig-, Lotion- und Schaumprodukten für alle Anforderungen im Bereich Händehygiene.

Leistungsmerkmale Spender

- Patentierte Hybrid-Funktion
- Durch die Warnmeldung zum geringen Produkt-Füllstand werden die Mitarbeiter informiert, wenn das Produkt zur Neige geht; der Spender ist „niemals-leer“
- Ein kratzfestes und UV-beständiges Gehäuse aus robustem und zuverlässigem ABS-Kunststoff, das keine Stellen aufweist, an denen sich Schmutz ansammeln kann, sorgt für einfache Pflege und Wartung und ein makelloses Aussehen
- Eine aussergewöhnlich lange Batterie-Lebensdauer und wasserdichte Komponenten garantieren zuverlässig langen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand
- Hochmodernes Spender-Design mit grossem Sichtfenster, über das die Anwender das Produkt identifizieren und den Füllstand sehen können
- Einfache und intuitive berührungslose Bedienung, ergänzt durch ein Feld mit der Aufschrift „Push“, das leuchtet wenn die Batterien gewechselt werden müssen
- Der Spender kann bis zum Batteriewechsel manuelle bedient werden, so dass weiterhin Produkt verfügbar ist
- Schalter für Veränderung der Dosierung (0.4ml / 1ml) im Spender
- Möglichkeit zur Platzierung eines personalisierbaren Schildes am unteren Ende des Sichtfensters
- Optionales Zubehör: Tropfschale, Standsäule



IntelliCare™

Smarter Design. Sustainable Care.

Hybrid-Spender für die Händehygiene.

Vorteile

- Das Gerät ist stets funktionsbereit - dies minimiert das Risiko für Infektionen oder anderer unbedingt zu vermeidender Vorfälle, die durch nicht betriebsbereite Spender verursacht werden
- Verbesserte Arbeitseffizienz durch schnelle und einfache Produktabgabe, Nachfüllung und Produkterkennung
- Fördert die Einhaltung der Händehygiene-Vorschriften und unterstützt die öffentliche Gesundheit
- Umweltfreundlich mit unerreichter Lebenszyklus-Nachhaltigkeitsbewertung
- Fügt sich dank des modernen Designs harmonisch in verschiedenste Nutzungsumgebungen ein

Leistungsmerkmale Nachfüllflaschen

- Einzigartige Gestaltung der Flaschen, die sich selbst zusammenfallen
- Recycelbare Nachfüllflasche, die 30% weniger Kunststoff/ml benötigt als konventionelle Flaschen
- Hermetisch verschlossene Flasche mit tropffreier Dosierpumpe, die nicht verstopft, so dass der Flascheninhalt zuverlässig frei von Verunreinigungen ist, wodurch das Risiko von Bakterienansammlungen vermieden wird
- Flasche mit mehr Inhalt, die eine kostengünstige Händehygiene ermöglicht und die Häufigkeit der Nachfüllvorgänge minimiert
- Alarmmeldung bei einem Rest von 20 Hüben (1ml/Hub) unterstützt die Nachfüllplanung und die vollständige Produktentleerung
- Flasche mit speziell geformtem Hals für schnelles, sicheres und einfaches Nachfüllen

Anwendungshinweise

- Hände ungefähr 5 cm unter den Spender halten
- Innerhalb 1 Sekunde ab der Sensoraktivierung wird das Produkt abgegeben
- Wenn das Symbol „PUSH“ leuchtet, muss der Spender manuell („drücken“) betätigt werden, dies zeigt an, dass die Batterien gewechselt werden müssen

Technische Daten		Beschreibung	Art.-Nr.
Farbe	Schwarz/Weiss	IntelliCare Spender Hybrid schwarz 1 Stück	D7524179
Dosierung	0,4 ml/Hub 1,0 ml/Hub	IntelliCare Spender Hybrid weiss 1 Stück	D7524180
Abmessungen (cm)	28,2 (H) x 15,8 (B) x 10,1 (T)	IntelliCare Tropfschale schwarz 1 Stück	D7524181
		IntelliCare Tropfschale grau 1 Stück	D7524182
Material	ABS-Kunststoff (Gehäuse) PP (rückwärtige Platte) Polyoxymethylen (Hammer) Polycarbonat (Sichtfenster)		
Lebensdauer der Batterie	90'000 Dosiervorgänge* *Basierend auf normaler Nutzung mit Flüssigprodukt bei Niedrig-Dosierung (0.4ml)		

Um das Anwenderhandbuch herunterzuladen und für weitere Informationen, besuchen Sie bitte: www.sealedair.com/intellicare