


Klarheit in der ultraschallkontrollierten Regionalanästhesie

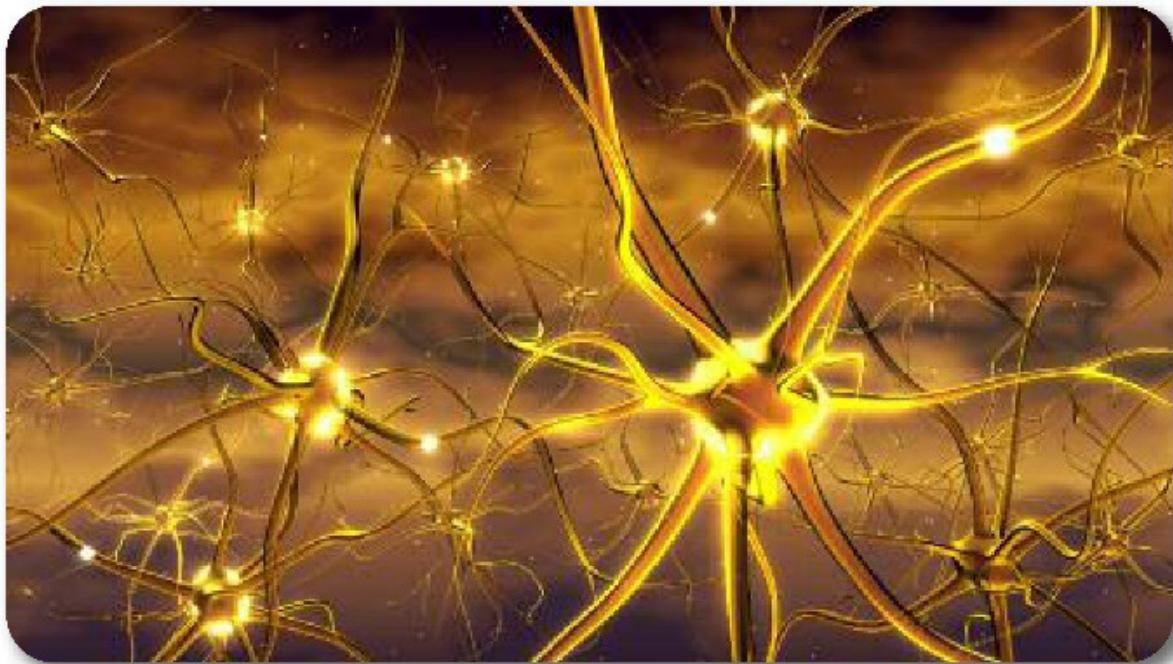

Die Flexasoft® Ultraschallbezüge von Caditec

... ausgezeichnete Bildqualität

... einfache Handhabung

... komplettes Produktsortiment

Die Flexasoft® Ultraschallbezüge werden mittels Haftfolie faltenfrei auf dem Ultraschallkopf fixiert. Zusätzliche Übertragungsmittel wie z. B. Gel oder Wasser im Bezug sind daher nicht notwendig. Diese Technik ermöglicht eine ausgezeichnete Bildqualität in der ultraschallkontrollierten Regionalanästhesie und eine Minimierung von Artefakten.



Eine aufwendige Fixierung des Bezuges mit Gummibändern ist entbehrlich und die Ultraschallköpfe werden nicht durch Gel verunreinigt, wodurch auch die damit verbundenen Reinigungsarbeiten entfallen. Die Klebefolie lässt sich nach der Anwendung einfach und rückstandsfrei vom Transducer entfernen. Die Teleskopfaltung der Bezüge ab 50 cm Länge sorgt für eine einfache Handhabung und angenehme Applikation, wobei der Ultraschallgriff mit dem mitgelieferten weißen Klebestreifen zusätzlich fixiert werden kann.


Das vollständige Produktsortiment in den Längen von 28 cm, 50 cm, 80 cm, 120 cm und 250 cm bietet das richtige Produkt für jede Anwendung. Die Verwendung der linearen Ultraschallbezüge mit gerader Klebefläche für gerade Ultraschallköpfe und der convexen Ultraschallbezüge mit formgestanzter Klebefläche für abgerundete Ultraschallköpfe sorgt zusätzlich für eine reduzierte Faltenbildung bei der Applikation.



Die Flexasoft® Ultraschallbezüge werden von der Udo Heisig GmbH in Deutschland produziert und durch Elektronenbestrahlung im Einzelkarton schonend sterilisiert. Mit dem Produktionsstandort in Deutschland sind die Produkte schnell und zuverlässig verfügbar und werden gleichzeitig qualitativ hochwertig und unter Berücksichtigung von ökologischen Anforderungen produziert. Die Erfahrungen und Informationen von Anwendern werden in der Produktentwicklung konsequent berücksichtigt.

Einfache Applikation der sterilen Flexasoft® Ultraschallbezüge in wenigen Schritten

1

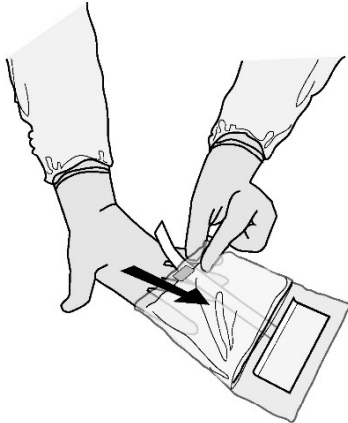


Den Bezug mit der Haftfläche nach oben platzieren - die sterile Person greift unterhalb des Klebestreifens ins Innere des Bezuges.

2




Mit der freien Hand wird das Silikonpapier der Haftfläche nach vorne abgezogen - hierzu dient die von der Haftfläche abgelöste Lasche des Silikonpapiers.

3

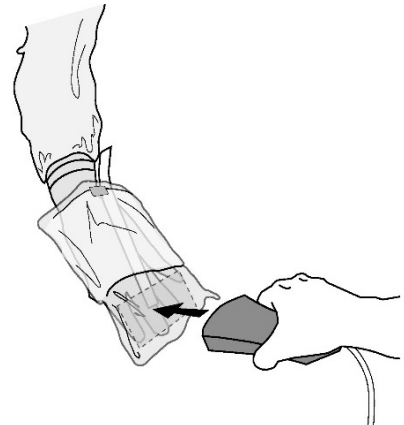


Der Springer platziert den Ultraschallkopf auf die Haftfläche - die sterile Person streicht vom Inneren des Bezugs die Haftfläche fest. Bei eventueller Faltenbildung ist eine Neupositionierung des Ultraschallkopfes möglich.

4

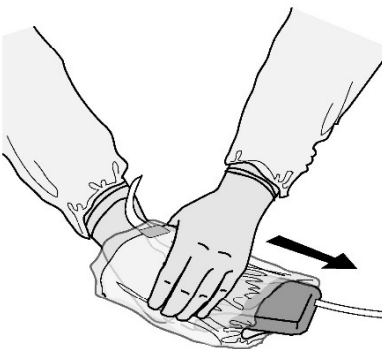

Die sterile Person hält den Ultraschallkopf im Innern des Bezuges fest und zieht mit der freien Hand den Bezug über den Ultraschallkopf - nun kann der Springer übernehmen und den Bezug entlang des Kabels bis zum Ende ziehen.

5

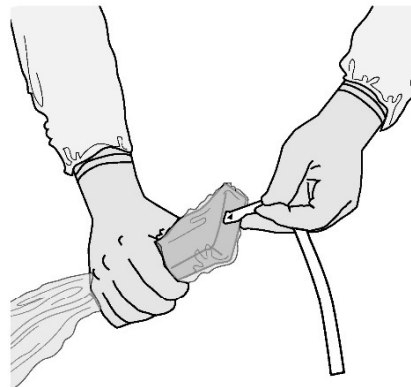

Die sterile Person entfernt nun den Klebestreifen an der Außenseite des Ultraschallkopfes.

6



Durch Umwickeln mit dem Klebestreifen kann der Bezug am Griff des Ultraschallkopfes nun zusätzlich fixiert werden. Während des Vorgangs wird das Schutzpapier am Klebestreifen Stück für Stück entfernt.

FLEXASOFT® Ultraschallbezüge mit Haftfolie

Art.Nr.	Artikel	VE
31803	Flexasoft - Linear 18 x 30 cm	100 Stk.
31805	Flexasoft - Linear 18 x 50 cm	100 Stk.
31808	Flexasoft - Linear 18 x 80 cm	100 Stk.
31812	Flexasoft - Linear 18 x 120 cm	100 Stk.
31825	Flexasoft - Linear 18 x 250 cm	50 Stk.
31903	Flexasoft - Convex 18 x 30 cm	100 Stk.
31905	Flexasoft - Convex 18 x 50 cm	100 Stk.
31908	Flexasoft - Convex 18 x 80 cm	100 Stk.
31912	Flexasoft - Convex 18 x 120 cm	100 Stk.
31925	Flexasoft - Convex 18 x 250 cm	50 Stk.

* Alle Artikel sind auch - gegen Aufpreis - mit Gel erhältlich. Die jeweilige Artikelnummer wird durch WG ergänzt, z. B. 31812WG.



Abb. Flexasoft Convex Ultraschallbezug



Abb. Flexasoft Linear Ultraschallbezug

