

EUROSETS

# WATERLILY™ TS

UNTERDRUCKWUNDBEHANDLUNG




WOUND MANAGEMENT

## BESCHREIBUNG

Waterlily™ ist ein nicht-invasives, dynamisches und mobiles System, mit dem durch die Applikation von Unterdruck auf der Wunde die folgenden Wirkungen erreicht werden:

- A** Verbesserung der lokalen Durchblutung
- B** Verringerung von Ödemen
- C** Förderung der Bildung von Granulationsgewebe
- D** Anregung des Zellwachstums
- E** Verringerung der Bakterienbelastung

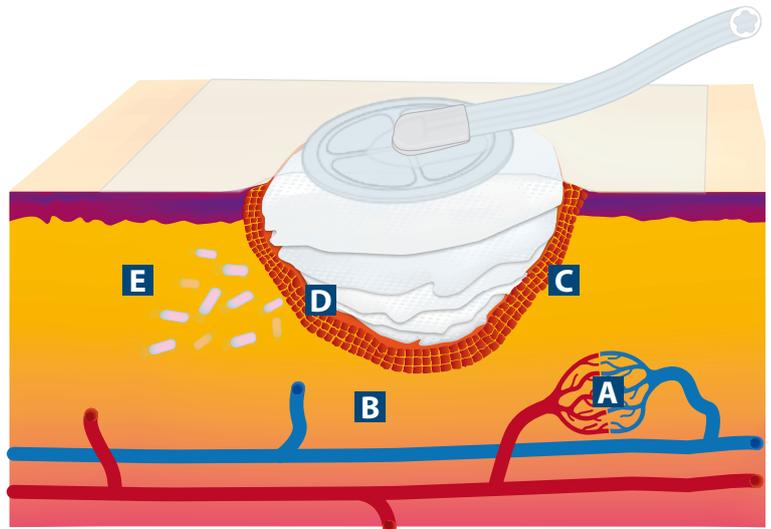

Bei der Waterlily™ Behandlung wird ein negativer (subatmosphärischer) Druck auf die Läsion ausgeübt:

- durch Verwendung eines Drainageschlauchs vom Typ Jackson-Pratt® oder
- eines Drainageports.

Der Unterdruck kann je nach Art der zu behandelnden Wunde und der klinischen Ziele kontinuierlich oder intermittierend ausgeübt werden.

### HAUPTINDIKATIONEN

- Ulcera
- Diabetischer Fuß
- Dekubiti
- Hauttransplantate
- Dehiszenzen
- Traumatische Wunden
- Verbrennungen

### KONTRAINDIKATIONEN

- Maligne Läsionen
- Unbehandelte Osteomyelitis
- Nicht untersuchte Fisteln
- Nekrotisches Gewebe mit Wundschorf
- Freiliegende Blutgefäße und Organe



Die **Wound Bed Preparation** ist die umfassende und koordinierte Behandlung der Hautläsion, die dazu dient, endogene Heilungsprozesse zu beschleunigen, aber auch die Wirksamkeit anderer Behandlungsmaßnahmen zu unterstützen (V. Falanga)

Sie zeichnet sich durch **vier Phasen** aus:

#### 1 Wund-Débridement

Entfernung nekrotischer, geschädigter oder infizierter Gewebe, die die Heilung der Läsion beeinträchtigen könnten

#### 2 Kontrolle der Bakterienbelastung

#### 3 Kontrolle des Exsudats

Bei chronischen Wunden könnte die Zusammensetzung bzw. das erhöhte Vorhandensein von Exsudat die Anregung der Wachstumsfaktoren verlangsamen oder blockieren.

#### 4 Korrektur der biologischen Mikroumwelt

Sie ist darauf gerichtet, die Verschließung der Epidermis zu fördern


Die korrekte Durchführung der Wound Bed Preparation ermöglicht:

- eine angemessene Vorbereitung des Wundbetts,
- Reduktion von Einschränkungen, die den Heilungsprozess behindern.



Leicht  
Mobil  
Effizient  
Einfach zu verwenden

# VAKUUMGENERATOR

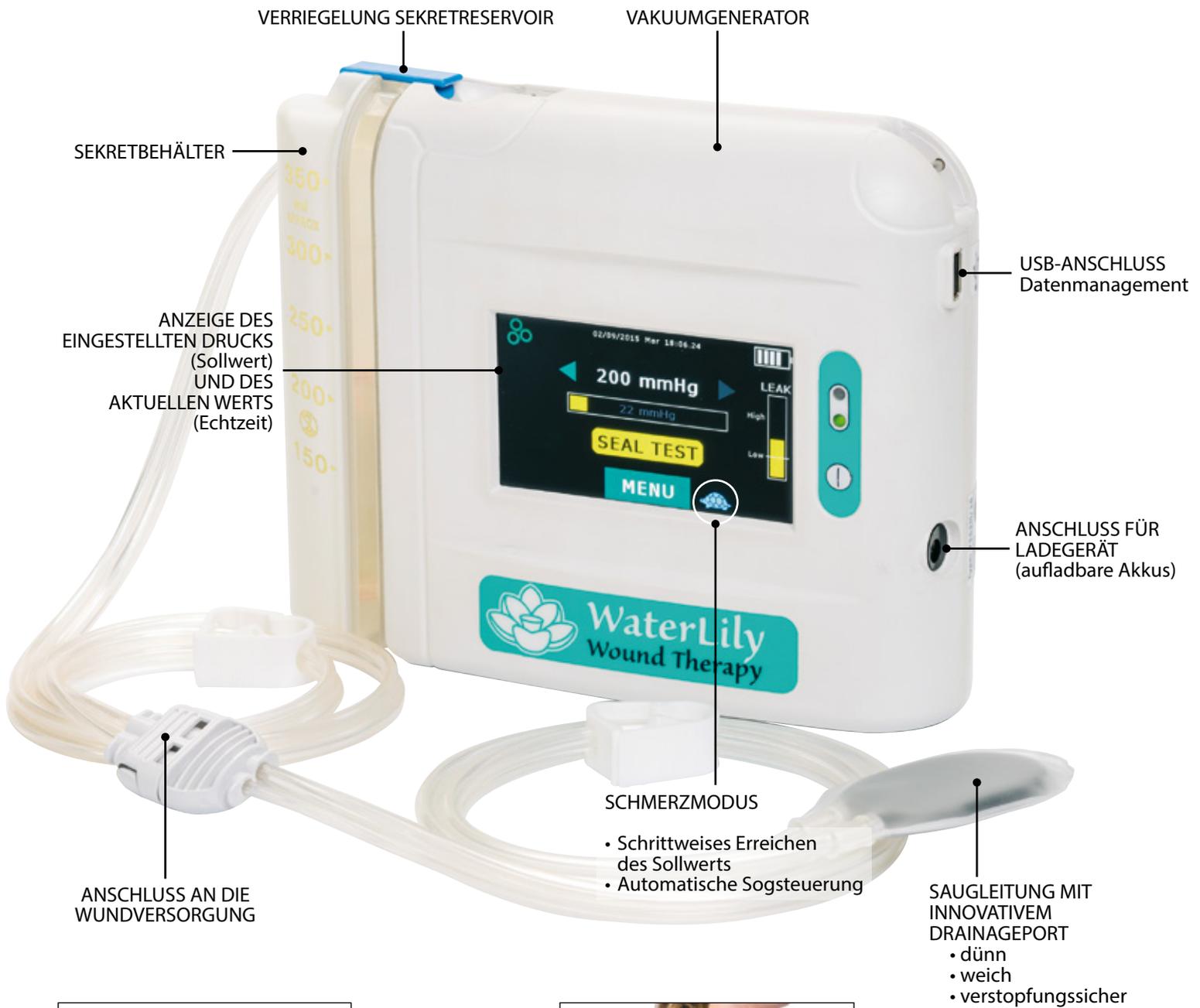

# DISPLAYFUNKTIONEN

EINSTELLEN DES SOGS  
 - kontinuierlicher Druck  
 - intermittierender Druck  
 (ON-/OFF-Zeiten einstellbar)

ANZEIGE DER WÄHLBAREN MASSEINHEITEN  
 FÜR DEN UNTERDRUCK  
 mmHg , cmH<sub>2</sub>O, mbar, Pa x 100

ALARME: - *eingestellter Druck wird nicht erreicht*  
 - *Reservoir voll*  
 - *Schlauch verstopft*  
 - *Akku entladen*  
 - *Erinnerungs-Timer*

DATENMANAGEMENT

SPERRSCHLÜSSEL



ALARM-LED  
 BETRIEBS-LED

TASTE ON/OFF

HAUPTMENU

# EINSTELLBEREICH UNTERDRUCK

Unterdruck einstellbar  
 von -20 mmHg bis -200 mmHg




# EIGENSCHAFTEN DES RESERVOIRS



GELIERMITTEL

STERILISIERENDE HYDROPHOBE MEMBRAN  
 AKTIVKOHLEFILTER „Geruchskontrolle“

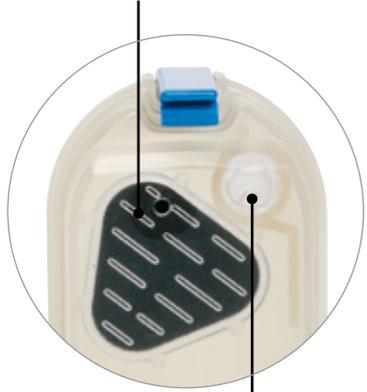

STERILISIERENDE  
 HYDROPHOBE MEMBRAN



Schutz des Anwenders auch  
 bei versehentlichem Kippen  
 oder Fallen des Geräts.  
 Schutz des Vakuumpengenerators.  
 Kein Kontakt des gesammelten  
 Exsudats mit der Umgebung.

# WUNDVERSORGUNG MIT DRAINAGEPORT UND PU-SCHWAMM

- KLEIN (S)
- MITTEL (M)
- GROSS (L)


Bestandteile des Wundversorgungssets mit Drainageport und PU-Schwamm:

- A** Schwamm aus Polyurethan (PU) großporig
- B** Selbstklebendes Drainagepad (Drainageport) mit Saugleitung (Knickschutz)
- C** Selbstklebende Wundfolie für NPWT

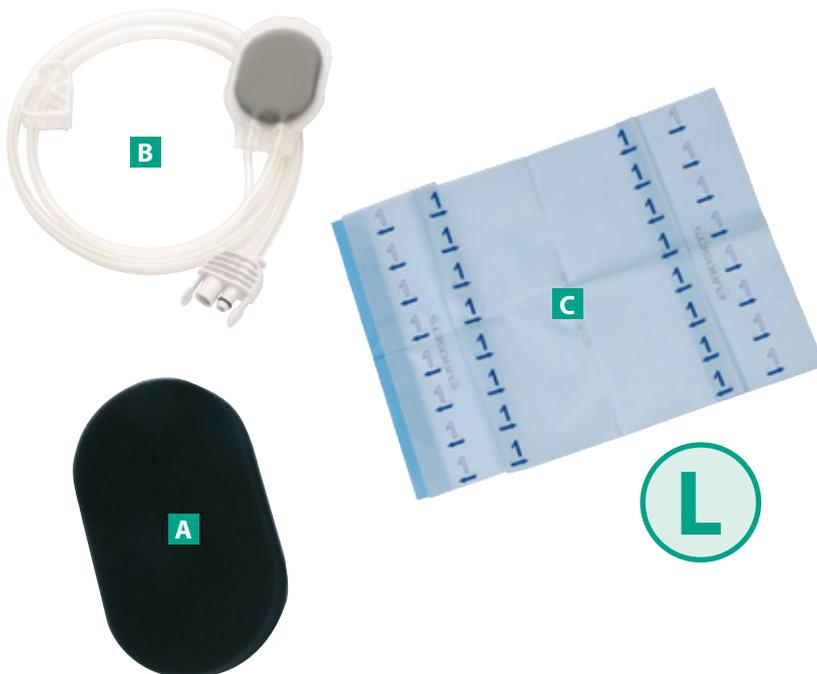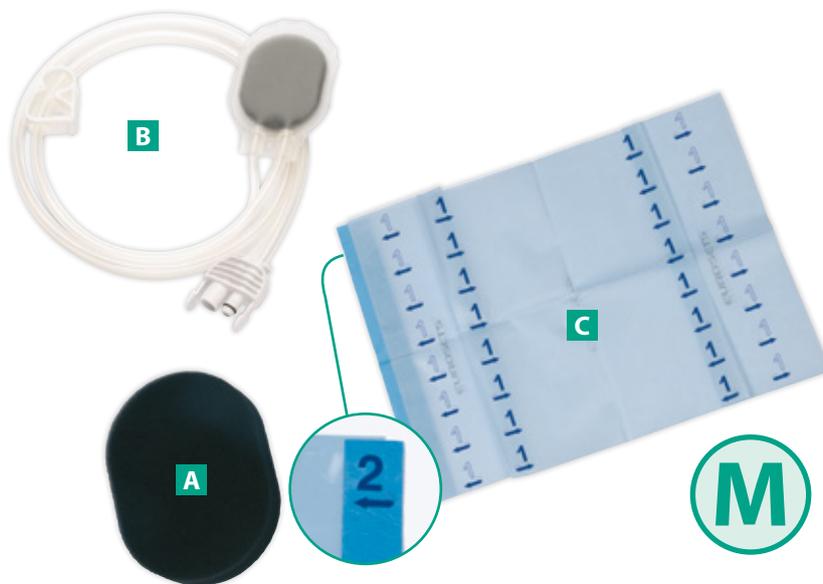

## WUNDVERSORGUNG MIT DRAINAGEPORT UND GAZE


- A** Kendall Gaze  
(Kerlix™ AMD™, antibakteriell,  
enthält 0,2 % Polyhexamethylen-  
Biguanid)
- B** Selbstklebendes Drainagepad  
(Drainageport) mit Saugleitung  
(Knickschutz)
- C** Selbstklebende Wundfolie  
für NPWT

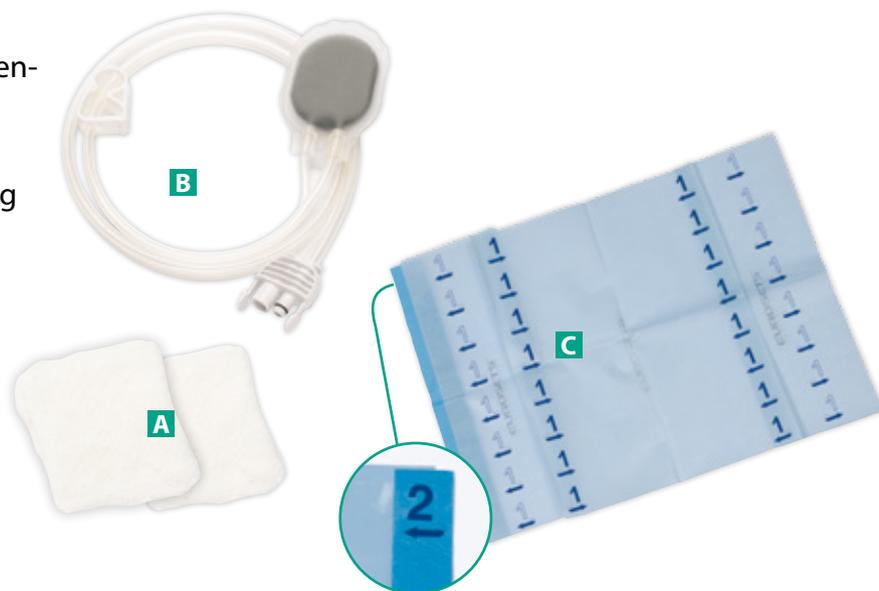

## WUNDVERSORGUNG MIT FLACHDRAINAGE VOM TYP JACKSON-PRATT® UND GAZE

Bestandteile des Wundversorgungssets  
mit Jackson Pratt Flachdrainage

- A** Kendall Gaze  
(Kerlix™ AMD™, antibakteriell,  
enthält 0,2 % Polyhexamethylen-  
Biguanid)
- B** Saugleitung mit Knickschutz
- C** Selbstklebende Wundfolie  
für NPWT
- D** Flachdrainage vom Typ  
Jackson-Pratt®

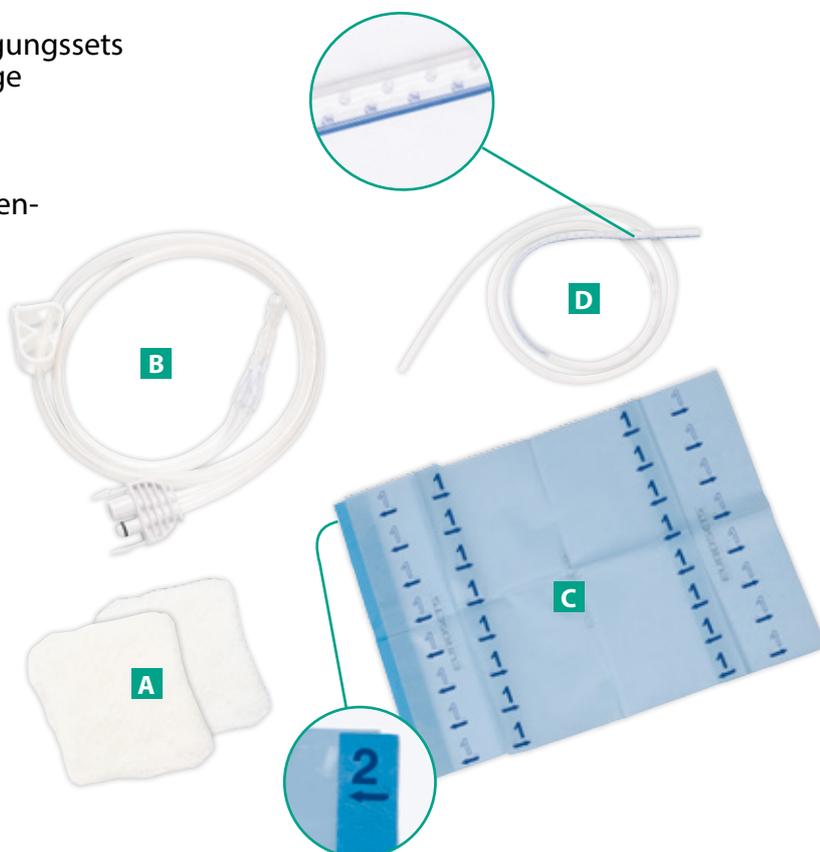

**BESTELLINFORMATIONEN VAKUUMGENERATOR UND SEKRETBEHÄLTER**

|        |  |    |
|--------|--|----|
| EU3902 | Waterlily™ TS Vakuum-Generator                 | 1  |
| EU3923 | Tragetasche für Waterlily™ TS Vakuum-Generator | 1  |
| EU3904 | Sekretbehälter 350 ml für Waterlily™ TS        | 10 |

**BESTELLINFORMATIONEN WUNDVERSORGUNGSSETS***SETS MIT GAZE*

|          |  |    |
|----------|--|----|
| EU4011/A | Kit 11A Waterlily™TS mit Drainageport (2 x antibakterielle Gaze Kerlix 15x17 cm, 1 x Wundfolie, Drainageport)                          | 12 |
| EU4011/B | Kit 11B Waterlily™TS mit Drainageport (1 x antibakterielle Gaze Kerlix - Rolle mit 11,4 x 370 cm, 2 x Wundfolie, Drainageport)         | 6  |
| EU4012/A | Kit 12A Waterlily™TS mit J. Pratt Drainage (2 x Gaze, Wundfolie, Absaugschlauch und J. Pratt® Drainage)                                | 12 |
| EU4012/B | Kit 12B Waterlily™TS mit J. Pratt Drainage (1 x Gaze - Rolle mit 11,4 x 370 cm + 2 x Wundfolie, Absaugschlauch und J. Pratt® Drainage) | 6  |

*SETS MIT PU-SCHAUM*

|        |   |    |
|--------|---|----|
| EU4013 | Kit Waterlily™TS mit PU-Schaum klein (1 x PU-Schaum 10x8x 3 cm, 1 x Wundfolie, 1 x Drainageport)  | 12 |
| EU4014 | Kit Waterlily™TS mit PU-Schaum mittel (1 x PU-Schaum 18x13x3 cm, 2 x Wundfolie, 1 x Drainageport) | 12 |
| EU4015 | Kit Waterlily™TS mit PU-Schaum groß (1 x PU-Schaum 26x15x3 cm, 2 x Wundfolie, 1 x Drainageport)   | 6  |

**BESTELLINFORMATIONEN EINZELKOMPONENTEN**

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| EU3922    | Waterlily™ TS Drainageport mit einem Klebepad  | 6  |
| EU3921    | Waterlily™ TS Absaugschlauch für Jackson-Pratt® Drainage                                 | 6  |
| EU3919    | Waterlily™ TS Drainageport mit 2 Klebepads zum Absaugen an zwei Positionen               | 6  |
| 24110     | Jackson-Pratt® Flach-Drainage 3 x 7 mm   | 12 |
| EU3920    | Waterlily™ TS Antidekubitus Drainageport-Brücke (1 x Drainageport-Brücke, 1 x Wundfolie) | 6  |
| EU3915    | Wundfolie 318 x 260 mm   | 24 |
| 6662      | Antibakterielle Gaze Kendall Kerlix™ AMD™ 15x17 cm (2 Stück)                             | 24 |
| 3331      | Antibakterielle Gaze Kendall Kerlix™ AMD™ Rolle mit 11,4 x 370 cm (1 Stück)              | 6  |
| EU3910/45 | Waterlily™ PU-Schaum S (klein - 10x8x3 cm)   | 24 |
| EU3911/45 | Waterlily™ PU-Schaum M (mittel - 18x13x3 cm)   | 24 |
| EU3912/45 | Waterlily™ PU-Schaum L (groß - 26x15x3 cm)   | 18 |
| EU3918/45 | Set Waterlily™ PU-Schaum rund (je 1 x Ø 100 / 60 / 40 / 30 und 22 x 1,9 mm)              | 48 |

Rev. 06 / 2017



Latex free

Prodotto da  
Manufactured by  
Fabriqué par  
Hersteller  
Fabricado por

Eurosets s.r.l.  
Strada Statale 12, n°143  
41036 Medolla (MO) Italy  
Tel: +39 0535 660311  
Fax: +39 0535 51248  
E-mail: info@eurosets.com  
[www.eurosets.com](http://www.eurosets.com)



Distribuito da  
Distributed by  
Distribué par  
Vertrieb  
Distribuido por



Kilianstraße 22  
55543 Bad Kreuznach – Deutschland  
Tel. +49-(0)671-30 329  
Fax +49-(0)671-9203 5944  
Email: info@caditec.org  
Webseite: [www.caditec.org](http://www.caditec.org)